

# Flächendesinfektion BODE X-WIPES Safety Pack



# BODE X-Wipes Safety Pack

Einweg-Vliestuchspendersystem für höchste Hygienesicherheit.



## Eigenschaften

- praktisches Einwegsysteem
- keine Aufbereitung erforderlich
- minimierte Keimverschleppung / keine Biofilmbildung
- für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN
- Standfestigkeit bis zum letzten Tuch
- hochwertiges PET-Vlies für optimale Wirkstoffabgabe
- mit 2,5 Litern Gebrauchslösung befüllbar
- Lösung 28 Tage verwendbar

Das BODE X-Wipes Safety Pack bietet die gewohnte Flexibilität des BODE X-Wipes Systems in Kombination mit einem Höchstmaß an hygienischer Sicherheit, da die Aufbereitung komplett entfällt.

## Anwendungsgebiete

Das BODE X-Wipes Safety Pack empfiehlt sich zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen hygiene relevanten Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und in Bereichen in denen ein Höchstmaß an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Anwendernutzen gewünscht wird, z. B.

- auf Arbeitsflächen
- auf Patientenliegen
- auf patientennahen Flächen
- auf Flächen in Isolierzimmern
- zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen in kritischen Hygienebereichen
- an Einsatzorten, an denen kein Wasseranschluss verfügbar ist
- überall dort, wo eine hygienische Aufbereitung von Vliestuch-Spendern nicht möglich ist

## Sicherer Einsatz in Hochrisikobereichen

Das BODE X-WIPES Safety Pack kann für die Flächendesinfektion in Hochrisikobereichen gemäß der Empfehlung des VAH eingesetzt werden, da die Aufbereitung komplett entfällt. Die Gefahr der Verkeimung wird minimiert und die Biofilmbildung vermieden.

## Aufbau

Das BODE X-Wipes Safety Pack besteht aus einem Standbodenbeutel mit fest verschweißtem Entnahmesystem und einer trockenen X-Wipes Vliesrolle. Nach Entfernung des Originalitätsverschlusses im Inneren des Verschlussdeckels wird das System mit einer geeigneten Flächen-Desinfektionsmittellösung befüllt.

## Die Bestandteile

### Standbodenbeutel:

- robustes Beutelmateriale aus Polyethylen
- transparenter Tragegriff für den einfachen Transport zum Einsatzgebiet

### Befüll- und Entnahmesystem:

- Befüllungs-/Entnahmeöffnung für eine schnelle und sichere Befüllung sowie eine einfache Entnahme
- passgenauer Deckelverschluss zum Schutz vor Kontamination und Austrocknung der Tücher
- Originalitätsverschluss des unbenutzten Safety Packs

### BODE X-Wipes Vliesrolle:

- 90 Tücher aus hochwertigem PET Vlies (60 g/m<sup>2</sup>)
- rechteckiges Tuchformat von 200 x 380 mm für optimale Flächenbenetzung

Die speziell aufeinander abgestimmte Konstruktion aus Entnahmesystem, festem Beutelmateriale und stabil ausgebildetem Boden sorgt für Standfestigkeit des BODE X-Wipes Safety Packs bis zum letzten Tuch.

### Anwendung

Das BODE X-Wipes Safety Pack ist für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN geeignet. Das System wird mit 2,5 Litern Gebrauchslösung des Desinfektionsmittels befüllt.

Beim Einsatz von Anwendungslösungen, die aus einem Konzentrat ange-setzt werden (z.B. Mikrobac forte, Kohrsolin FF,- extra), sollte mindes-tens die VAH-Einsatzkonzentration mit einer Einwirkzeit von einer Stun-de (oder kürzer) gewählt werden.

Bei der Herstellung der Anwendungs-lösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes zu beachten.

Alkoholische Schnell-Desinfektions-mittel (z.B. Bacillol AF, Bacillol 30 Foam) sind gebrauchsfertig und wer-den unverdünnt eingesetzt.

Das Safety Pack nach dem Gebrauch einfach entleeren und verwerfen.

### Kompatibilität


Das BODE X-Wipes Safety Pack kann mit allen flüssigen HARTMANN Flä-chen-Desinfektionsmitteln verwendet werden.

Nicht geeignet zur Kombination mit Dismozon plus.

### Standzeit

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die im BODE X-Wipes Safety Pack eingesetzten Flächen-Desinfek-tionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

### Befüllung

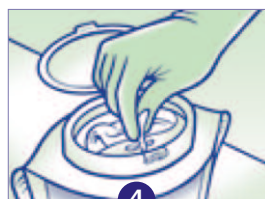

### Befüllung des BODE X-Wipes Safety Pack

1. Handschuhe anziehen.
2. Originalitätsverschluss öffnen.
3. 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung zugeben.
4. Vliestuch durch Entnahmevorrichtung führen.
5. Folie beschriften.
6. Standzeit: 28 Tage.

Die Sicherheit von Personal und Patient steht im Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Engagements. Umfassende Wirksamkeitsnachweise, die Auseinandersetzung mit Infektionsrisiken und die Entwicklung von Qualitäts-Produkten und gezielten Präventionsmethoden leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

Wir forschen für den Infektionsschutz. [www.bode-science-center.de](http://www.bode-science-center.de)





	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>BODE X-Wipes Safety Pack</b>				
Vliesrolle im Standbodenbeutel	90 Tücher	981 416	–	4

**Hinweise**

Bei den im BODE X-Wipes Safety Pack eingesetzten Anwendungslösungen handelt es sich häufig um Verdünnungen von Gefahrstoffen, sodass eventuell besondere Schutz- / Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind. Diese sind den Spezifikationen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Die allgemeinen Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der hauseigene Hygieneplan sind zu berücksichtigen. Das Befüllen des BODE X-Wipes Safety Packs mit nicht dafür freigegebenen oder selbstständig gemischten Lösungen ist unbedingt zu unterlassen. Einige Substanzen, wie z.B. Peroxide, Verdüner oder Oxidationsmittel, können Verpuffungen oder Selbstentzündungen auslösen.

Die Standzeit von 28 Tagen wird nur bei korrekt verschlossenem Deckel empfohlen. Der Deckelverschluss ist nach Entnahme eines BODE X-Wipes wieder fest zu verschließen. Das BODE X-Wipes Safety Pack ist nicht für die Lagerung, den Transport von Gebrauchslösungen oder die Wiederbefüllung einzusetzen.

PAUL HARTMANN AG  
 Postfach 14 20  
 89504 Heidenheim  
 Deutschland

Telefon +49 7321 36-0  
 Telefax +49 7321 36-3636  
 info@hartmann.info

www.hartmann.de

P 202 (08.15) 084 323/6



**Gesundheit ist  
 unser Antrieb**