

Desinfektionstücher

# CLEANISEPT® WIPES SURFACE

## Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfangreiche, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung



### Produktbeschreibung

CLEANISEPT WIPES SURFACE sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur viruziden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung.

CLEANISEPT WIPES SURFACE bieten bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

### Anwendungsgebiete

**Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nicht invasiven Medizinprodukten, sowie Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen.

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art, insbesondere in Bereichen mit erhöhten Wirksamkeitsanforderungen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit			2 min
<b>Bakterien und Hefen</b>			
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH** / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	●
sporizid (Clostridium difficile)	EN 13704		●
<b>Viren</b>			
viruzid	RKI/DVV	inkl. Polio-, Adeno-, Noroviren und SV40 /Papova/Polyomaviren	●
viruzid	EN 14476/ prEN 16777	niedrige Belastung	●
wirksam gegen Polyomaviren	4-Felder-Test / praxisnaher Carriertest		●

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)  
 \*\*gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

### Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:  
 0,4 g Alkyl(C12-6)dimethylbenzylammoniumchlorid,  
 0,2 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### Materialverträglichkeit

Freigegeben für die Anwendung mit Ultraschallköpfen folgender Hersteller:  
 - Esaote GmbH, Köln  
 - Siemens Medical Solutions, Erlangen

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.



Desinfektionstücher

# CLEANISEPT® WIPES SURFACE

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.
CLEANISEPT WIPES SURFACE	Packung	12	80 Tücher	20 x 22 cm	00-235-T080

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

