

Gebrauchsanleitung melipul® Tabletten-Mörser

Hinweis:

Bei Medikamenten, die weder zerteilt noch pulverisiert werden sollen, empfehlen wir mit Ihrem Arzt oder Apotheke abzuklären, ob der Tabletten-Mörser angewendet werden darf.

Der Mörser eignet sich nicht für retard und magenresistente Medikamente. Der spülmaschinenfeste Mörser ist nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Eigenschaften:

Material	Polycarbonat
Gewicht	34g
Maße	40 mm Ø x 39 mm hoch
Temperaturbeständigkeit	93°C
Artikelnummer	01375000

SCHWARZ Pflegesysteme

Helmut Schwarz GmbH
Rengers 6 | 88316 Isny
Telefon 07562 9755020
info@schwarz-pflegesysteme.de
www.schwarz-pflegesysteme.de

SCHWARZ
PFLEGESYSTEME



1. Tabletten-Mörser öffnen

Halten Sie den Mörser an den geriffelten Flächen fest und schrauben Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf.

2. Tablette einlegen und pulverisieren

Legen Sie die Tablette in den unteren Teil ein und schrauben Sie beide Teile zusammen, bis diese spürbar Kontakt bekommen. Drehen Sie dann beide Hälften hin und her um die Tablette zu zerkleinern.

3. Pulver entnehmen

Schrauben Sie beide Teile auseinander und entnehmen Sie das Tablettenpulver.

01/2020

melipul®

SCHWARZ
PFLEGESYSTEME

TABLETTEN-MÖRSE GEBRAUCHSANLEITUNG



Gebrauchsanleitung melipul® Tabletten-Teiler

Hinweis: Bei Medikamenten, die weder zerteilt noch pulverisiert werden sollen, empfehlen wir mit Ihrem Arzt oder Apotheke abzuklären, ob der Tabletten-Teiler angewendet werden darf. Der spülmaschinenfeste Teiler ist nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Achtung: Bei unsachgemäßer Bedienung besteht Verletzungsgefahr, die Klinge aus chirurgischem Edelstahl ist sehr scharf!


Eigenschaften:

Material	ABS
Gewicht	27g
Maße	40 mm Ø x 55 mm hoch
Temperaturbeständigkeit	65°C
Artikelnummer	01375500

SCHWARZ Pflegesysteme

Helmut Schwarz GmbH
Rengers 6 | 88316 Isny
Telefon 07562 9755020
info@schwarz-pflegesysteme.de
www.schwarz-pflegesysteme.de

SCHWARZ
PFLEGESYSTEME

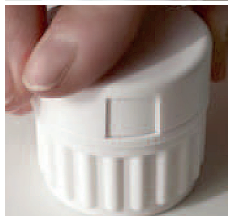

1. Tabletten einlegen

Öffnen Sie den Tabletten-Teiler und legen Sie die Tablette bündig nach oben zur Spitze ein.

2. Teiler schließen

Drücken Sie mit Daumen oder Zeigefinger den geöffneten Deckel auf das Unterteil.

3. Tablette entnehmen

Öffnen Sie den Teiler und entnehmen Sie die Tablettenhälften.

melipul®

SCHWARZ
PFLEGESYSTEME

TABLETTEN-TEILER GEBRAUCHSANLEITUNG



01/2020